

# Ficha técnica

## TIRAS DENTALES BLANQUEADORAS PROFESSIONAL DR.INUK

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las TIRAS BLANQUEADORAS PROFESSIONAL es un producto destinado a blanquear los dientes de forma permanente mediante la extracción de las sustancias amarillentas del esmalte y el blanqueamiento del propio esmalte mediante un proceso controlado y seguro de oxidación.

Este producto es útil para blanquear dientes reales manchados de color amarillento por la comida, el café, el té o el tabaco. Este producto no será efectivo para blanquear manchas producidas por medicamentos como la tetraciclina o la clorhexidina. Este producto solo actúa sobre dientes reales, es decir, no mejora el color de dientes postizos, fundas, composites o carillas.

### TECNOLOGIA DE DR. INUK

**TIRAS DENTALES BLANQUEADORAS DR INUK** es un producto desarrollado y fabricado en España inspirado en las famosas tiras americanas CREST. Las tiras blanqueadoras PROFESSIONAL de DR.INUK están formuladas con Peróxido de Hidrógeno con una concentración del 6% (equivalente al 18% de peróxido de carbamida) como ingrediente principal y que conjuntamente con otros ingredientes potencian su efecto oxidativo y quelante atrayendo las manchas del esmalte.

El peróxido de hidrógeno blanquea los dientes oxidando las manchas y aclarando el color general del diente. Funciona entrando a través de la capa de esmalte y alterando y rompiendo las moléculas que mantienen el color amarillento.

La urea, presente en el peróxido de carbamida (peróxido de hidrógeno + urea), se utiliza para que el peróxido de hidrógeno sea más estable y la liberación del peróxido se libere de forma controlada. En este caso, el formato al ser una tira, el peróxido de hidrógeno se mantiene estable y su liberación está controlada y no es necesario la utilización de la urea.

La matriz adhesiva odontológica contiene los activos y las sustancias oxidativas, por lo que, gracias al efecto oclusivo del parche, absorbe las manchas amarillentas, apareciendo el blanco natural de los dientes. La forma galénica de tira, a diferencia de otros formatos como las pastas dentales, polvos blanqueantes o los enjuagues, permite que los ingredientes estén en contacto constante con el esmalte potenciando su efecto y evitando la dispersión del ingrediente.

En este caso es un adhesivo odontológico de tercera generación que no deja residuos en los dientes una vez retirada la tira.

## BENEFICIOS Y MODO DE EMPLEO

Las **TIRAS DENTALES BLANQUEADORAS PROFESSIONAL DR INUK**, es un producto que ha sido diseñado para conseguir una acción blanqueante de forma cómoda, fácil y eficaz

### Fácil aplicación

- 1.- Cepillar los dientes y eliminar por completo los restos de pasta de dientes.
- 2.- Aplicar tira superior (la más grande) y la tira inferior. No es necesario secar la saliva, el adhesivo se adhiere sin problema.
- 3.- Dejar actuar 60 min.
- 4.- Retirar las tiras y cepillar de nuevo para eliminar el adhesivo sobrante.

### Tratamiento

- Aplicar las tiras 1 vez al día (durante los 60 minutos) durante 14 días consecutivos.
- Aunque con 14 días ya se obtienen resultados, se puede hacer el tratamiento de **28 días para maximizar los resultados**.

### Cómodo y discreto

Las tiras son transparentes y gracias a su fuerte adhesivo, a diferencia de los dispositivos blanqueadores led o las férulas, permite hacer cualquier cosa mientras se hace el tratamiento.

## ESTUDIOS CLÍNICOS

### Resultados demostrados- ESTUDIOS DE EFICACIA

En 30 sujetos adultos, con edades comprendidas entre los 23 y los 55 años, se aplicó la muestra de prueba (TIRAS BLANQUEADORAS PROFESSIONAL) durante 14 y 28 días en condiciones normales, midiendo el valor de brillo de los dientes L\*, por evaluación clínica realizada por un cirujano dental de acuerdo con el estándar de evaluación de la guía de colores AD.

Los resultados mostraron que la muestra de prueba tuvo eficacia de blanqueamiento dental después de los 14 y 28 días de aplicación.

Las TIRAS BLANQUEADORAS PROFESSIONAL es un producto evaluado científicamente demostrando una efectividad en el **93,3% de los pacientes con una mejora del 36,25% en la GUÍA de color A-D**".

**El 100% de los adultos que participaron en el estudio de eficacia recomendarían el producto**

#### **PRECAUCIONES DE USO**

Mantener fuera del alcance de los niños. No se recomienda el uso en menores de 16 años. Tanto las tiras como el gel no deben ingerirse, no tragar en ningún caso las tiras.

No fumar, beber o vapear mientras las tiras se encuentren aplicadas en la boca. Evitar el contacto del gel con los ojos, si se da el caso, lavar los ojos rápidamente con agua fría. No usar el producto si lleva Brackets o ataches o cualquier otro aparato que resguarde la dentadura. Las tiras no funcionarán en dientes postizos.

#### **Formula INCI:**

Glycerin, PVP, Aqua (Water), Hydrogen Peroxide, Alcohol, Xylitol, Ethylcellulose, Sodium Polyacrylate, Stevioside, Menthol

#### Código de barras



8 437024 824114

8437024824114

#### Presentación:

- Caja precintada con 14 sobres de aluminio individuales de aluminio con 2 tiras (mandíbula inferior y mandíbula superior) PVP: 59,90€

**Tiras dentales blanqueadoras**  
**PROFESSIONAL**  
Dental whitening strips  
**PROFESSIONAL**

Sabor menta / Mint flavour

1 Aplicación / 2 tiras  
1 Application / 2 strips

NO DAÑA EL ENAMEL  
DENTAL SAFE

DR. INUK®

Bandes de blanchiment dentaire. N'abîme pas l'émail. Goût menthe - Strisce sbiancanti dentali. Non danneggia lo smalto. Sapore di menta- Tiras de clareamiento dental. No dañifica o esmalte. Sabor menta - Zahnaufhellungstreifen. Beschädigt den Zahnschmelz nicht - Mirageschmack -  
DR. INUK® - DR. INUK® - DR. INUK®

Modo de empleo y precauciones: ver caja contenedora. • Modo de uso, advertencias e restrições de uso: ver embalagem externa • Use and warnings: see external container.

Contiene: 1 aplicación/2 bandas  
Contiene: 1 aplicação/2 tiras  
Contém: 1 aplicação/2 tiras  
Inhalt: 1 Anwendung/2 Streifen  
содержит: 1 аппл./2 полоски

MDCI VENTURES SL  
806970427  
Av. de Barcelona, 245, 08730 Molins de Rei, Barcelona - España

DR. INUK

DR. INUK

LOTE: 202402

Categoría: Cosmético.



DR. INUK®